

Papacárie Duo

Elimina las caries sin dolor

Una gota de Papacárie colocada sobre el tejido cariado, ablanda la lesión y permite despegarla de la dentina sana. **Papacárie sólo actúa sobre el tejido infectado, dejando intacto el diente sano***.

En solamente **30 segundos**, sin dolor ni sensibilidad, puede removerse la caries con una simple cureta. No es preciso el uso de anestesia ni elementos rotatorios.



*"La Papaína actúa solamente en el tejido lesionado debido a la ausencia de una antiproteína plasmática, la α_1 -anti-tripsina, que impide su acción proteolítica en tejidos considerados normales" Papain Gel: A new Chemo-Mechanical Caries Removal Agent. Sandra Kalil et al. Journal of Clinical Pediatric Dent 30(20): 115-120, 2005

Cómo usar Papacárie

1. Asegurarse de tener un acceso visible a la caries. Colocar la cantidad de gel (dependiendo del tamaño cavitario) sobre la loseta de vidrio o directamente sobre el guante.
2. Llenar la cavidad con PAPACARIE y dejar que el producto actúe durante **30-60 segundos**.
3. **Remover la dentina cariada ablandada con la cureta** (no es necesario una herramienta afilada). En caso de caries de gran tamaño puede realizarse una segunda aplicación hasta comprobar la ausencia de tejido infectado. La superficie debe aparecer brillante.

Cuando no se altera la apariencia del gel significa que no hay más caries en descomposición.

4. Después de la remoción, limpiar la zona y proceder a obturar la cavidad con el protocolo habitual. La superficie queda brillante, dura y descontaminada.

